



Laerdal

helping save lives



Gereed, eenvoudig en competent

Laerdal-suctie-eenheid

Laerdal Suction Unit

Eenvoudig te begrijpen grafische gebruikersinterface

Verklaring over groot vacuüm/grote stroom (ISO 10079)

Testknop op apparaat

Vacuümindicator

Stroom aan-indicator


Indicator voor externe stroom

Indicator voor storingsmodus

Indicator voor de batterijstatus

Vacuüminstellingen (0-500+ mmHg)
0=UIT

Lichtblauw (links): tracheaal
Donkerblauw (rechts): orofaryngeaal

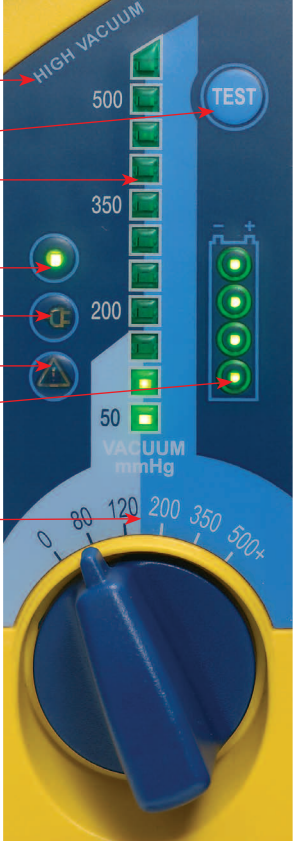

De LSU is uitgerust met apparaatdiagnostiek, een batterij die zonder hulpmiddelen kan worden vervangen, ingebouwde oplader, geïntegreerde vacuümregelaar/stroomknop en "robuust" stootvast/spatwaterdicht ontwerp. De LSU werkt zonder geluid te maken.

De LSU is uitgerust met apparaatdiagnostiek en heeft de mogelijkheid de gereedheid voor gebruik te bepalen.

- De gebruiker kan testen op:
- Occlusie in het suctiesysteem
 - Efficiëntie van opbouwen vacuüm van het pompsysteem
 - Maximaal bereikbaar vacuümniveau
 - Lekkage van lucht
 - Status van opladen van batterij

Met de LSU kunt u erop rekenen op elk moment de beste patiëntenzorg te verlenen.

De Laerdal-suctie-eenheid is het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van luchtwegzorg aan de tekentafel en in de praktijk, en is daarom de compacte en betaalbare keuze voor de extreemste situaties.



780030 LSU met Serres®-opvangzakstelsysteem

780000 LSU met herbruikbaar opvangrecipiënt

5 JAAR GARANTIE*

* Exclusief batterij, opvangrecipiënt, stroomsnoeren en normale slijtage



Deze grote, enkele knop is eenvoudig te activeren en bij te stellen, zelfs met brandweerhandschoenen aan

De LSU is gemakkelijk van de wandbeugel los te maken, zelfs met handschoenen aan



Gebruiksvriendelijke opslag van patiëntleiding

Connectoren met kleur- en maatcodering op de LSU

Gebruiksvriendelijke afbeelding voor leiding

Het gebruiksgemak wordt gewaarborgd door een batterij die zonder hulpmiddelen kan worden vervangen, ingebouwde oplader en meerdere stroomopties

De eenheid is getest om te voldoen aan de classificatie IP34D, waardoor het apparaat in de regen kan worden gebruikt zonder risico op storingen

Stille werking

De LSU is extreem stil bij gebruik met de lage vacuümniveaus. Hierdoor is de eenheid met name effectief op een kinderafdeling of in een andere setting waar het rustig moet zijn.

Lage vacuüm-instelling 46 dBA



GEWICHT (inclusief batterij)	4.0 kg
AFMETING	H 315 X W 330 X D 160 mm
CAPACITEIT VAN OPVANGRECIPIËNT	1000ml
PATIËNTASPIRATIELEIDING (niet-steriel)	Herbruikbaar; binnendiameter van 8 mm, lengte van 150 cm Serres 5 binnendiameter van 8 mm, lengte van 180 cm

Door stroom aangedreven, medisch suctie-apparaat voor gebruik in het veld en op locatie, in overeenstemming met ISO 10079-1:1999.	Apparatuur van klasse II en type BF, in overeenstemming met IEC 60601-12e editie(2000).
Groot vacuüm/grote stroom.	Beschermingsklasse IP34D spatwaterdicht, in overeenstemming met IEC 60529 (2001)
Niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen.	Voldoet aan EN 1789:1999.

80 mmHg	120 mmHg	200 mmHg	350 mmHg	500+ mmHg
12 l/min	16 l/min	20 l/min	23 l/min	25 l/min
Gebruiksduur van de batterij (vrije luchtstroom) bij verschillende instellingen				
80 mmHg	120 mmHg	200 mmHg	350 mmHg	500+ mmHg
3h 20 min	2h 20 min	1h 30 min	1 h	45 min
Geschatte geluidsniveaus (vrije luchtstroom) bij verschillende instellingen				
80 mmHg	120 mmHg	200 mmHg	350 mmHg	500+ mmHg
46 dbA	48 dbA	51 dbA	53 dbA	56 dbA
Stroomspecificatie				
Werking/opladen		100-240 V wisselstroom of 12-28 V gelijkstroom		
Verzegelde loodzuurbatterij		12 V gelijkstroom 2,0 Ah		

Cat. No.	Omschrijving		
780000	LSU met herbruikbaar opvangrecipiënt	782610	Wandbeugel met stroomsnoer voor wisselstroom, VS
780030	LSU met Serres®-opvangzakstelsysteem	782620	Wandbeugel met stroomsnoer voor wisselstroom, EU
		782630	Wandbeugel met stroomsnoer voor wisselstroom, VK
	Verbruiksartikelen	782640	Wandbeugel zonder stroomsnoer
781200	Aerosolfilter voor herbruikbaar opvangrecipiënt van LSU	782300	Schouderriem
57151	Serres-opvangzak 1000 ml	782400	Heuptas
5833181	Serres-aspiratieleiding 180 cm	780440	Externe oplaadset
	Toebehoren		
782000	Draagtas (voor volledig apparaat)		
782600	Wandbeugel met stroomsnoer voor gelijkstroom		



CE Het product voldoet aan de essentiële vereisten van de Europese richtlijn 93/42/EEG; Richtlijn inzake medische apparaten zoals gewijzigd door 2007/47/EG.



LSU-wandbeugel

Voor meer productinformatie: www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives